



BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG

KHOA HUYẾT HỌC – TRUYỀN MÁU

QUY TRÌNH

LƯU VÀ HỦY BỆNH PHẨM SAU XÉT  
NGHIỆM

Mã số: QT.17.

HHTM. QL

Phiên bản: 3.0

Ngày ban hành:

20/07/2016

	Người biên soạn	Người kiểm tra	Người phê duyệt
Họ và tên	Nguyễn Thị Thanh Tâm	Bùi Thị Nguyệt Ánh	Hoàng Văn Tuyết
Ký tên			
Chức vụ	Nhân viên	KTV trưởng	Trưởng khoa
Ngày	...../...../.....	...../...../.....	...../...../.....

THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

Phiên bản số	Vị trí sửa đổi	Nội dung sửa đổi	Ngày xem xét/sửa đổi	Người xem xét/sửa đổi
3.0	Toàn bộ quy trình	Thay đổi theo mẫu quy trình thực hành chuẩn theo quyết định số 5530/QĐ- BYT của Bộ y tế	01.07.2016/ 20.07.2016	Hoàng Văn Tuyết/ Nguyễn Việt Dũng

- 1. Người có liên quan phải nghiên cứu và thực hiện đúng các nội dung của quy trình này.*
- 2. Nội dung trong quy trình này có hiệu lực thi hành như sự chỉ đạo của Giám đốc Bệnh viện.*
- 3. Mỗi đơn vị được phát 01 bản (có đóng dấu kiểm soát). Các đơn vị khi có nhu cầu bổ sung thêm tài liệu, đề nghị liên hệ với thư ký ISO để có bản đóng dấu kiểm soát.*

**NƠI NHẬN**

<b>STT</b>	<b>Nơi nhận</b>	<b>STT</b>	<b>Nơi nhận</b>
1.	Giám đốc	3.	Khoa Huyết học truyền máu
2.	Phòng Kế hoạch tổng hợp		

## 1.Mục đích

Quy định thống nhất cách thức lưu và hủy mẫu bệnh phẩm sau khi làm xét nghiệm tại khoa Huyết học truyền máu.

## 2.Phạm vi áp dụng

Áp dụng cho tất cả các nhân viên của Khoa Huyết học truyền máu cách lưu và hủy mẫu bệnh phẩm sau khi làm xét nghiệm tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

## 3.Trách nhiệm

Tất cả nhân viên Khoa Huyết học Truyền máu có trách nhiệm thực hiện theo đúng quy trình này

## 4.Định nghĩa, thuật ngữ và từ viết tắt

### 4.1 Định nghĩa:

Không có

### 4.2 Giải thích thuật ngữ

Không có

### 4.3 Từ viết tắt

Không có

## 5. Nội dung thực hiện

### 5.1 Lưu bệnh phẩm

- Với bệnh phẩm làm xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu ngoại vi: bệnh phẩm sau khi tiến hành làm xét nghiệm xong được xếp theo thứ tự đánh số trên thân ống vào các giá xếp có ghi rõ ngày tháng năm. Bệnh phẩm được phân thành hai loại phòng khám và bệnh phòng.
- Với bệnh phẩm làm xét nghiệm đông máu cũng như trên nhưng không phân loại phòng khám và bệnh phòng.
- Các mẫu bệnh phẩm sau khi thực hiện xét nghiệm xong lưu theo yêu cầu của quy định của từng loại xét nghiệm và theo quy định Phụ lục 01 của quy trình này . Các mẫu bệnh phẩm được cán bộ xét nghiệm ghi cụ thể thời gian lưu và hủy mẫu vào Sổ lưu và hủy mẫu bệnh phẩm trong Khoa theo biểu mẫu BM.17.HHTM.QL.01.

- Các mẫu lưu được lưu giữ tại khu vực riêng của mỗi phòng trong tủ lạnh . Tủ lưu mẫu được theo dõi nhiệt độ theo BM.08.HHTM.QL.02 . Khi cần sử dụng mẫu lưu để kiểm tra, người lấy mẫu ghi lại các thông tin về thời gian, mục đích và ký tên vào mục ghi chú trong BM.17.HHTM.QL.01.

### 5.2 Hủy bệnh phẩm

- Bệnh phẩm khi đến hết thời gian lưu được đưa đi hủy theo như quy trình Phân loại và thu gom xử lý rác thải theo quy định về quản lý chất thải Y tế và có ký bàn giao với Y công của Khoa xét nghiệm trước khi đem đi hủy;

### 6. Hồ sơ

STT	Tên hồ sơ lưu	Nơi lưu	Thời gian lưu
3	Sổ lưu và hủy mẫu bệnh phẩm	Khoa HHTM	5 năm

### 7. Tài liệu liên quan

Thời gian lưu và nhiệt độ khi lưu mẫu xét nghiệm: Phụ lục 01

Sổ lưu và hủy mẫu bệnh phẩm – BM.17.HHTM.QL.01

Phiếu theo dõi nhiệt độ tủ lưu mẫu bệnh phẩm – BM.08.HHTM.QL.02

### 8. Tài liệu tham khảo

Quy định về quản lý chất thải Y tế (Căn cứ vào quyết định số 43/2007/QĐ-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế).